

ES - INDICACIONES DE USO: Desinfectante para circuitos de aspiración. Solución líquida concentrada libre de aldehídos y fenoles para la desinfección, limpieza y desodorización de los circuitos de aspiración y escupideras.

PRESENTACIÓN: Monodosis de 10 ml.

COMPOSICIÓN: 100 g de Zeta 5 Power Act contienen 5 g de N-(3-Aminopropil) N-Dodecilpropano-1,3-Diammina, 4,2 g de Propionato de N,N-Metilpoli(oxietil)amonio, tensioactivos, inhibidores de corrosión, aditivos, auxiliares y agua en cantidad suficiente para 100 g.

CONTRAINDICACIONES: No se conoce ninguna contraindicación.

ADVERTENCIAS: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. En caso de contacto con la piel o con el cabello, quitarse la ropa contaminada y aclarar la piel. En caso de contacto con los ojos aclarar con abundante agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Si la irritación persiste consultar a un médico. En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y contactar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico.

PRECAUCIONES: Llevar guantes, ropa de protección y proteger los ojos y la cara. Lavarse las manos tras la manipulación. Evitese su liberación al medio ambiente y elimínese de acuerdo con las normas locales. Se recomienda almacenar el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco y lejos de la luz solar directa. La fecha de vencimiento del producto es válida si se encuentra en el envase íntegro y almacenado correctamente. Se recomienda almacenar el producto a una temperatura no superior a 27 °C.

EFFECTOS SECUNDARIOS: No se han observado efectos secundarios.

INSTRUCCIONES PASO A PASO:

1. Aclarar el sistema de aspiración, aspirando 2 litros de agua fría (fig. 1).
2. Preparar al menos un litro de solución por cada equipo dental: llenar un recipiente con agua y vierta 10 ml de Zeta 5 Power Act por cada litro de agua (figs. 2, 3, 4).
3. Mezclar (fig. 5). La solución aparecerá opalescente.
4. Aspirar la solución preparada a través de los tubos de aspiración (fig. 6). Verter al menos 250 - 300 ml de solución desinfectante en la escupidera.
5. Dejar actuar durante 15 minutos para una desinfección rápida. Dejar actuar durante al menos 4 horas (toda la noche) para lograr el espectro de la actividad indicado en la tabla (incl. Tuberculicida).
6. Al final del tiempo de actividad, aclarar el sistema de aspiración, aspirando 2 litros de agua fría (fig. 1).

La práctica debe realizarse al menos al final de cada día de trabajo, repitiéndola preferentemente en la mitad del día y al final de cada intervención muy invasiva.

ESPECTRO DE LA ACTIVIDAD

Eficacia (microorganismos)	Norma de referencia	Concentración	Tiempo de acción (minutos)
Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN13727	1%	15
	EN14561	1%	15
Levaduricida (C. albicans)	EN13624	1%	15
	EN14562	1%	15
Tuberculicida (M. terrae)	EN14348	1%	240
En forma limitada viricida contra virus encapsulados y lipofílicos, incluyendo virus en la sangre (HIV, VHB, VHC), herpes simple y las familias de virus como orthomyxoviridae (incluyendo todos los virus de la gripe humana y animal como el H5N1 y H1N1), filoviridae (virus del Ébola) y paramyxoviridae (virus del sarampión)	DVV/RKI	1%	1
	DVV (superficies no porosas)	1%	60
	prEN16777	1%	60
Bactericida, Levaduricida	VAH	0,5%	60

OBSERVACIONES IMPORTANTES: las informaciones suministradas en cualquier otra forma, incluso durante las demostraciones, no exoneran de respetar las instrucciones de uso. El operador sanitario debe controlar que el producto sea apto para la aplicación prevista. La empresa no se hace responsable de daños, incluso a terceros, que surjan del incumplimiento de las instrucciones o por resultar el producto no apto a la aplicación y, de todas maneras, dentro de los límites del valor de los productos suministrados.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Zhermack

zeta 5 power act

specific for aspirators

concentrated use at 1%

- > Bactericidal
- > Yeasticidal
- > Tuberculocidal
- > Limited Virucidal
(e.g. HIV, HBV, HCV, H5N1, H1N1)



Zhermack S.p.A. | via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597 611 | www.zhermack.com