

Zeta 1 Ultra

Zhermack

zeta 1 ultra

ES - USO PREVISTO: Desinfección y limpieza de productos sanitarios.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Zeta 1 Ultra es un desinfectante concentrado de amplio espectro para la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumentos quirúrgicos y rotatorios.

**ENVASE:** Botella 1 L. **COMPOSICIÓN:** 100 g de Zeta 1 Ultra contienen 18 g de 3-aminopropil-iodocel-1,3-propanodiamina, 15 g de alcohol-bencil-dimetil amonio cloruro, tensioactivos no iónicos, agentes sequestrantes, agentes inhibidores de corrosión, aditivos, coadyuvantes y agua suficiente hasta alcanzar los 100 g.

**INDICACIONES DE USO:** El producto está destinado a ser utilizado por un profesional del sector dental o sanitario con habilidades específicas en el proceso de desinfección de productos sanitarios. El producto está destinado para la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumentos quirúrgicos y rotatorios. El producto no está destinado para ser usado directamente en el paciente.

**CONTRAINDICACIONES:** Ninguna contraindicación comprobada. **ADVERTENCIAS:** No ingerir. Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto, lávelo abundantemente con agua. En caso de ingestión, póngase en contacto inmediatamente con un médico o un centro de información toxicológica. No mezcle Zeta 1 Ultra con otros desinfectantes y, en particular, con productos que contengan aldehídos (formaldehídos, glutaraldehídos, glacial, etc.) que puedan formar precipitados de color rosa o burdeos. Evite el contacto con citratos, yoduros, nitritos, peranganatos y peróxidos. Se recomienda reemplazar las soluciones desinfectantes usadas cada día. En caso de contaminación visible (sangre, saliva o tejidos orgánicos) y/o alteración del color/olor de la solución desinfectante, se debe reemplazar la solución de inmediato. La solución desinfectante que no se haya utilizado permanece estable 7 días si se almacena en un recipiente de plástico (HDPE, GPPS, ABS, PP y PMMA) cerrado, protegido de fuentes de luz y calor. Se aconseja anotar en el recipiente que contiene la solución diluida la fecha de inicio de la solución, el lote, la fecha de caducidad del producto y la fecha de preparación de la solución.

**PRECAUCIONES:** Desinfecte, limpie y enjuague la cuba de dilución antes de verter Zeta 1 Ultra. Cierre la cuba de dilución durante su uso. Cierre el recipiente después de cada uso. Zeta 1 Ultra podría dañar los instrumentos de aluminio y los componentes de PVC. Repetite las advertencias del fabricante sobre la compatibilidad de los materiales, el mantenimiento y el procesamiento de los instrumentos. Use guantes, mascar, gafas protectoras y ropa de trabajo. Trabaje en un ambiente correctamente ventilado. Evite la liberación del producto al medio ambiente y deséchelo conforme a la normativa local. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** No se han observado efectos secundarios.

**BENEFICIO CLÍNICO:** Formula sin aldehído, de amplio espectro para la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumentos quirúrgicos y rotatorios.

**INSTRUCCIONES PARA SU USO**

**Operaciones preliminares:**

1. Lea las instrucciones de uso y las informaciones de seguridad.
2. Use guantes, mascar, gafas protectoras y ropa de trabajo. Trabaje en un ambiente correctamente ventilado.

**Preparación de la solución:**

3. Rellene la cuba que contendrá la dilución con agua a temperatura ambiente (Fig. 1).
4. Añada 20 ml de Zeta 1 Ultra para obtener 1 litro de solución diluida (Fig. 2).
5. Mezcle la solución con una varilla de plástico (Fig. 4).

**Inmersión de los instrumentos:**

6. Sumerja totalmente los instrumentos en la solución diluida (Fig. 5, a).
7. Cierre la cuba de dilución (Fig. 5, b).
8. Dejar a remojo durante **60 minutos en un baño estático, o bien en un baño de ultrasonidos cerrado a 35 °C durante 30 minutos** (máx. 4 cíclos, todos ellos en el mismo día) de acuerdo con el espectro de acción que se desee (ver tabla de espectro de acción).

**Enjuagar los instrumentos:**

9. Cuando haya terminado el tiempo de acción, retire los instrumentos de la cuba de dilución y enjuáguelos abundantemente.
10. Cierre la cuba. Al final de la jornada laboral o después de un máximo de 4 cíclos, en caso de haber usado el baño de ultrasonidos, se aconseja lavar la cuba cuidadosamente, desinfectarla con desinfectantes que no contengan alcohol y, finalmente, enjuagarla abundantemente bajo agua corriente para eliminar posibles residuos. Se aconseja utilizar guantes. Respete las advertencias del fabricante sobre la compatibilidad de materiales, el mantenimiento y el procesamiento de la cuba.

**EPECTRO DE ACCIÓN** (Pruebas llevadas a cabo en presencia de solución)

cuba cuidadosamente, desinfectarla con desinfectantes que no contengan alcohol y, finalmente, enjuagarla abundantemente bajo agua corriente para eliminar posibles residuos. Se aconseja utilizar guantes. Respete las advertencias del fabricante sobre la compatibilidad de materiales, el mantenimiento y el procesamiento de la cuba.

	Eficacia (microorganismos)	Norma de referencia
<b>BAÑO ESTÁTICO*</b> <b>2% 60'</b>	<b>Bactericida</b> ( <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. hirae</i> )	EN 13727, EN 14561
	<b>Levuricida</b> ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624, EN 14562
	<b>Micobactericida, incluido Tuberculicida</b> ( <i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i> )	EN 14348, EN 14563
	<b>Virucida</b> ( <i>Poliovirus</i> , <i>Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i> , <i>VH1</i> , <i>HBV</i> , <i>HCV</i> )	EN 14476
	<b>Bactericida</b> ( <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. hirae</i> )	EN 13727, EN 14561
<b>BAÑO DE ULTRASONIDOS (35°C)</b> <b>2% 30'</b>	<b>Levuricida</b> ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624, EN 14562
	<b>Fungicida</b> ( <i>A. brasiliensis</i> )	EN 13624
	<b>Micobactericida, incluido Tuberculicida</b> ( <i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i> )	EN 14348, EN 14563
	<b>Virucida</b> ( <i>Poliovirus</i> , <i>Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i> , <i>VH1</i> , <i>HBV</i> , <i>HCV</i> )	EN 14476
	<b>Bactericida</b> ( <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. hirae</i> )	EN 13727, EN 14561

\*1% 15': Bactericida (EN 13727, EN 14561), Levuricida (EN 13624, EN 14562), Virucida de acción limitada contra VH1, HBV, HCV, Ebola, Herpes simpley todos los virus de la gripe animal y humana (H1N1v, pdm 09/77).

**ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD:** Almacene el producto correctamente cerrado a una temperatura de no más de 27 °C/80 °F, lejos de la luz directa en un ambiente fresco y seco. **OBSERVACIONES IMPORTANTES:** (Cualquier información adicional, transmitida incluso durante las demostraciones, no exime del cumplimiento de las instrucciones de uso. El operador tiene la obligación de verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La empresa no podrá hacerse responsable de los daños, incluso a terceros, causados por el incumplimiento de las instrucciones o la falta de idoneidad en su aplicación, que en cualquier caso será dentro de los límites del valor de los productos suministrados. Señalar al fabricante y a la autoridad competente cualquier incidente grave observado en relación con el dispositivo médico. **SOLA PARA USO PROFESIONAL.**


specific for instruments

concentrated | use at 2%

UPDATED

use concentration - spectrum of action

Follow the instructions for use to obtain complete spectrum

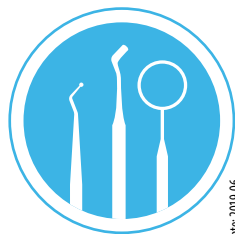

- > Bactericidal
- > Fungicidal
- > Mycobactericidal including tuberculocidal
- > Virucidal

1 L | disinfectant and cleaner for medical devices | www.zhermack.com

Reorder N. [REF] C810000



0123

Zhermack S.p.A. | via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy  
T +39 0425 597 611 | www.zhermack.com

